

Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

Produktgruppe IV: Funktionspolster

Produktgruppe:	Funktionspolster
Klassifikation MDR:	Klasse I
Basis UDI-DI:	04260502969960
UDI-DI:	diverse, siehe Anhang
Artikelnummer:	diverse, siehe Anhang
Zolltarifnummer:	4014 9000

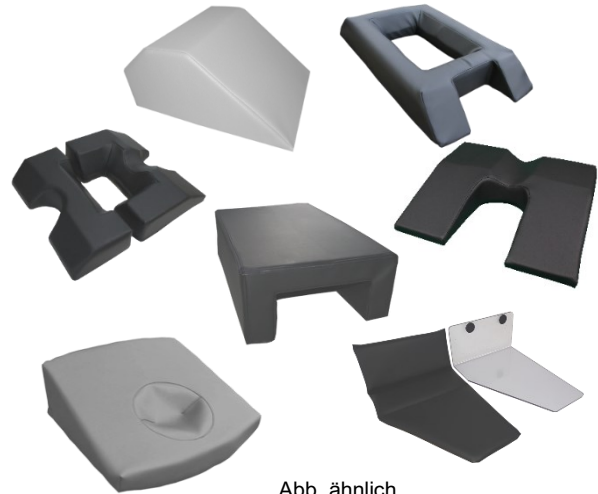


Abb. ähnlich

1. Technische Merkmale:

Maße:	diverse, siehe Anhang
Gewicht:	diverse, siehe Anhang
Material:	Kunstlederbezug, elektrisch ableitfähig-sofern ausgewiesen, PU-Schnittschaum, PU-Viscoschaum - nicht bei Keilen, Polycarbonat (ausschließlich bei Armanlagerungsschienen) Haken- und Flausch-Band, Nähgarn

2. Verwendungszweck

Die Produkte sind Lagerungshilfen zur intraoperativen Lagerung des Patiententorsos in medizinisch notwendigen/erwünschten Positionen.

Die ein-, zwei- und vierteilige Produktausführung speziell der Bauchfreilagerungskissen (s. Anhang) ermöglicht die Anpassung der Lagerungshilfe an die jeweilig gegebene Patientenanatomie. Eine visco-elastische Auflage auf dem jeweiligen Polsterträger der Bauchfreilagerungskissen dient der Druckreduzierung und unterstützt die Dekubitus-Prophylaxe insbesondere auch bei Langzeit-OP.

Soweit am Produktetikett ausgewiesen, sind diese Lagerungshilfen speziell für den Einsatz im Röntgen- / CT- und MRT-Bereich konzipiert.

3. Anwendungshinweise

Die Lagerungshilfen dürfen nur von eingewiesenem Fachpersonal verwendet werden. Die Anwendung des Produktes ist für medizinisches Fachpersonal unkritisch und entspricht der allgemeinen Übung zur Patientenlagerung im medizinischen Bereich. Position und Einsatz des Produktes wird durch das eingewiesene Fachpersonal vorgegeben und ausgewählt.

Bei der Anwendung sollte ein direkter Hautkontakt des Patienten zum Produkt z.B. durch ein flüssigkeitsdichtes Abdecktuch vermieden werden.

Eine Überwachung des Patienten während der Behandlung ist erforderlich, insbesondere aber nicht abschließend ist das Fortbestehen der wunsch- und ordnungsgemäßen Lagerung nach Bewegung/Umlagerung des Patienten zu überprüfen.

4. Warnhinweise

- Sichtprüfung vor jeder Anwendung auf mechanische Beschädigungen und nur bei Raumtemperatur anwenden. Sind Beschädigungen sichtbar z.B. brüchiger oder eingerissener Bezug darf das Produkt nicht am Patienten eingesetzt werden.
- Bei der Verwendung von Abdecktüchern als Hygieneschutz zwischen Patientenhaut und Lagerungshilfe ist jeweils für den Becken- und Thoraxbereich ein separates Tuch zu verwenden, da ein einzelnes, durchgehendes Tuch die angestrebte Bauchfreilagerung einschränken oder ganz verhindern könnte.
- Sofern das Produkt mit elektrisch ableitfähigem Kunstlederbezug hergestellt wurde (Angabe laut Textiletikett), darf die Lagerungshilfe bei Laser-OP nur mit einer elektrisch isolierenden Trennung vom OP-Tisch gemäß Herstellerangaben des Laser-Gerätes verwendet werden.

5. Reinigungshinweise

Das Produkt ist für die Wischdesinfektion konzipiert, keine Nass- oder Maschinenwäsche. Es ist nicht Tumbler geeignet.

Das Kunstleder ist feuchtigkeitsabweisend aber nicht absolut flüssigkeitsdicht. Staunässe ist deshalb unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt kann mit einer warmen, milden Seifenlauge **nebelfeucht** gereinigt und mit handelsüblichen, alkoholfreien Flächendesinfektionsmitteln gemäß der DGHM-Liste laut Herstellervorgaben desinfiziert werden. Alkoholische Desinfektionsmittel greifen die Verhautung des Kunstleders an, machen dieses brüchig und verringern die Lebensdauer des Produktes. Keinerlei aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen (z.B. harte Bürsten) verwenden.

6. Lagerung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend und eben sowie ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte erfolgen.

7. Entsorgung


Das gebrauchte Produkt ist als Klinikabfall in der Einstufung gemäß LAGA18 zu entsorgen. Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.

Hersteller:

Medstorm GmbH
Comeniusstr. 6
56073 Koblenz

Produkt hotline:

+49 261 / 973 237 95
buero@medstorm.de

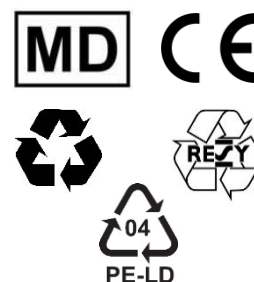

Anhang zum Datenblatt

Produktgruppe IV: Funktionspolster

Lfd.	Artikel-Nr.	UDI-ID	Bezeichnung	ca. Maße	ca. Gewicht
1.	100095	04260502961599	Kopfkalotte mit Armablage	div.	800 g
2.	100150-1	04260502960462	Doppelkeil-Kissen	48x43x11cm	1.100 g
3.	100165	04260502962329	Kopfpolster "Leonardo II"	50x22x20cm	450 g
4.	200040	04260502961490	Arm-Anlagerungsschiene (L-Form)	35x25x14cm	500 g
5.	200041	04260502961483	Einschubpolster f. Armschiene 200040	35x25x14cm	210 g
6.	200042	04260502961520	Arm-Anlagerungsschiene mit Polster	35x25x14cm	720 g
7.	200053	04260502961957	Arm-Anlagerungsschiene III	35x25x14cm	500 g
8.	200170	04260502960202	Tunnelkissen mit Weich-Auflage	65x40x22cm	1.950 g
9.	500095	04260502961049	Rahmenkissen, Typ I, 1-tlg.	84x46x12cm	2.000 g
10.	500100	04260502961056	Rahmenkissen, Typ II, 2-tlg.	60x53x12cm	1.900 g
11.	500102	04260502961513	Rahmenkissen (S), Typ II, 2-tlg.	60x53x14cm	2.000 g
12.	500105	04260502961391	Rahmenkissen, Typ III, 4-tlg.	82x45x14cm	1.800 g
13.	500110	04260502962374	Armablage für Herzkatheder, 2-tlg.	40x24x16cm	800 g
14.	500111	04260502962381	Höhenstufe f. HK-Polster 500110	40x14x07cm	250 g
15.	915015	04260502961438	Röntgenkeil, unregelmäßig	40x50x19cm	1.200 g

Liste endet mit der lfd. Nr. 15
Stand: 03. 08. 2024