

Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

Produktgruppe V: Kopflagerung

Produktgruppe:	Kopflagerung
Klassifikation MDR:	Klasse I
Basis UDI-DI:	04260502969953
UDI-DI:	diverse, siehe Anhang
Artikelnummer:	diverse, siehe Anhang
Zolltarifnummer:	4014 9000

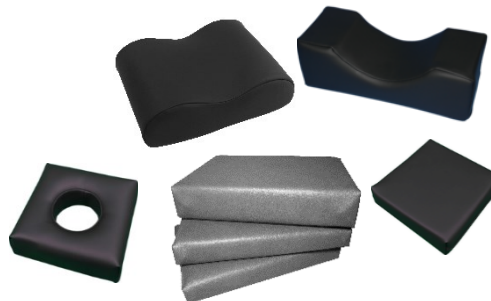


Abb. beispielhaft

1. Technische Merkmale:

Maße:	diverse, siehe Anhang
Gewicht:	diverse, siehe Anhang
Material:	Kunstlederbezug, soweit ausgewiesen elektrisch ableitfähig, alternativ monoelastisches Mischgewebe mit flüssigkeitsabweisender PU-Verhautung PU-Schnittschaum, Nähgarn, Haken- und Flausch-Band alternativ Reißverschluss

2. Verwendungszweck

Die Produkte sind Lagerungshilfen zur intraoperativen Lagerung des Kopfes. Je nach Produktauswahl erfolgt der Einsatz der Lagerungshilfen zum Intubieren oder für die Positionierung des Kopfes in Rücken- und Seitenlage.

3. Anwendungshinweise

Die Anwendung der Lagerungshilfen ist für medizinisches Fachpersonal unkritisch und entspricht der allgemeinen Übung zur Patientenerlagerung im medizinischen Bereich. Der Einsatz dieser Lagerungshilfen wird durch das eingewiesene Fachpersonal vorgegeben und ausgewählt.

Ein direkter Hautkontakt des Patienten mit dem Produkt ist zu vermeiden. Es sollte eine flüssigkeitsdichte Auflage, z.B. Ein- oder Mehrweghaube als Zwischenlage verwendet werden. Dies gilt explizit nicht für den Einsatz in Bauchlage.

4. Warnhinweise

- Soweit die Lagerungshilfen für den Einsatz in Bauchlage ausgewählt bzw. vorgesehen sind, dürfen keine Zwischenlagen / Saugtücher verwendet werden, die die Luftzufuhr zu Mund oder Nase des Patienten beeinträchtigen könnten.
- Die Lagerungshilfen nicht abspülen und nicht in Flüssigkeit tauchen.
- Nur bei Raumtemperatur anwenden.
- Sichtprüfung vor jeder Anwendung auf Unversehrtheit der Beschichtung (PUR-Verhautung). Sind Beschädigungen sichtbar z.B. Risse, Dellen, Verformungen darf die Lagerungshilfen nicht am Patienten eingesetzt werden.
- Die Lagerungshilfen sind ausschließlich für den Kontakt mit intakter Haut vorgesehen.
- Die Lagerungshilfen sind nicht mit dem Patienten verbunden. Sie dienen ausschließlich der aufliegenden Lagerung des Kopfes ohne zusätzliche Befestigungen.
- Die Beschichtung des Produktes ist feuchtigkeitabweisend aber nicht absolut flüssigkeitsdicht. Staunässe ist deshalb unbedingt zu vermeiden.

5. Reinigungshinweise

Die Lagerungshilfen sind für die Wischdesinfektion konzipiert, keine Nass- oder Maschinenwäsche. Sie sind nicht für Tumbler geeignet.

Die unbeschädigte Oberfläche kann mit einer warmen, milden Seifenlauge **nebelnfeucht** gereinigt werden und mit handelsüblichen, alkoholfreien Flächendesinfektionsmitteln gemäß der DGHM-Liste desinfizieren werden. Alkoholische Desinfektionsmittel greifen die PU-Verhautung an, machen diese durchlässig und verringern die Lebensdauer des Produkts. Keinerlei mechanisch aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen (z.B. Bürsten) verwenden.

Sollten die Lagerungshilfen Flüssigkeit aufnehmen, ist die Oberfläche beschädigt und das Medizinprodukt zu entsorgen.

6. Lagerung

Die Lagerungshilfen sind bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend, eben erfolgen, ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte.

7. Entsorgung


Das gebrauchte Produkt ist als Klinikabfall in der Einstufung gemäß LAGA18 zu entsorgen. Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.

Hersteller:

Medstorm GmbH
Comeniusstr. 6
56073 Koblenz

Produkt hotline:

+49 261 / 973 237 95
buero@medstorm.de

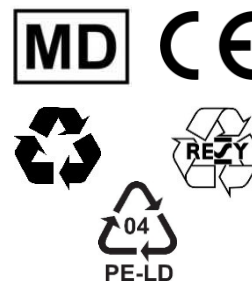

Anhang zum Datenblatt Produktgruppe V: Kopflagerung

Lfd.	Artikel-Nr.	UDI-DI	Bezeichnung	ca. Maße	ca. Gewicht
1.	100030	04260502960424	Nierenkissen -basic-	35x25x10/7cm	400 g
2.	100031	04260502961605	Nierenkissen extra soft	35x25x10/7cm	320 g
3.	100043-1	04260502961568	Intubationskissen	30x20x10cm	240 g
4.	100050-1	04260502961162	Kopfunterlage "universal"	33x14x11cm	250 g
5.	100056	04260502961964	Kopflagerung Kreisausschn.	20x20x6cm	220 g
6.	100103-09	04260502961544	Kopflagerung Bauchl. Gurt	37x25x13cm	400 g
7.	100121-1	04260502961551	Intubationskissen	20x20x5cm	190 g
8.	100145	04260502962008	Strumakissen, extrafest	40x20x5cm	330 g
9.	100170	04260502962305	Intubationskissen	33x14x11cm	335 g
10.	930032	04260502961582	Intubationskissen, KFV	30x20x8cm	200 g
11.	930040	04260502962244	Intubationskissen, RV	30x20x8cm	200 g

Liste endet mit der lfd. Nr. 11
Stand 17.05.2024