


## Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

### Produktgruppe VI: Lagerungshilfen sonstige

<b>Produktgruppe:</b>	<b>Lagerungshilfen sonstige</b>
Klassifikation MDR:	Klasse I
Basis UDI-DI:	04260502969946
UDI-DI:	diverse, siehe Anhang
Artikelnummer:	diverse, siehe Anhang
Zolltarifnummer:	4014 9000

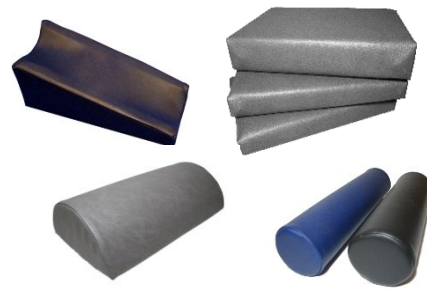

Produktbeispiele

#### 1. Technische Merkmale:

Maße:	diverse, siehe Anhang
Gewicht:	diverse, siehe Anhang
Material:	Kunstlederbezug, soweit ausgewiesen elektrisch ableitfähig, monoelastisches Mischgewebe mit flüssigkeitsabweisender PU-Verhautung und Gummizug – soweit zutreffend, PU-Schnittschaum, Nähgarn Haken- und Flausch-Band, alternativ Reißverschluss

#### 2. Verwendungszweck

Die Produkte sind Lagerungshilfen zur intraoperativen Patientenlagerung und dienen der Positionierung des Patienten in medizinisch notwendigen/erwünschten Positionen.

#### 3. Anwendungshinweise

Die Lagerungshilfen dürfen nur von eingewiesenem Fachpersonal verwendet werden. Die Anwendung der Produkte sind für medizinisches Fachpersonal unkritisch und entsprechen der allgemeinen Übung zur Patientenlagerung im medizinischen Bereich. Position und Einsatz der Produkte wird durch das eingewiesene Fachpersonal vorgegeben und ausgewählt. Bei der Anwendung ist ein direkter Hautkontakt des Patienten zum jeweiligen Produkt zu vermeiden, z.B. durch Zwischenlage einer saugenden, flüssigkeitsdichten Abdeckung. Eine Überwachung des Patienten während der Behandlung ist erforderlich, insbesondere -aber nicht abschließend- ist das Fortbestehen der wunsch- und ordnungsgemäßen Lagerung nach Bewegung/Umlagerung des Patienten zu überprüfen.

#### 4. Warnhinweise

- Sichtprüfung vor jeder Anwendung auf mechanische Beschädigungen und nur bei Raumtemperatur anwenden. Sind Beschädigungen sichtbar z.B. brüchiger oder eingerissener Bezug darf das betreffende Produkt nicht am Patienten eingesetzt werden.
- Sofern das jeweilige Produkt mit elektrisch ableitfähigem Kunstleder gefertigt wurde, sind bei Laser-OP eventuelle diesbezügliche Hinweise des Geräteherstellers zu beachten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Lagerungshilfen. Es ist diesbezüglich eine ständige Überwachung des Patienten erforderlich. Insbesondere nach Lageveränderungen des Patienten während der OP ist jeweils zu prüfen, ob die Ausrichtung/Anbringung der Lagerungshilfe noch dem angestrebten Zweck entspricht und keine Patientengefährdung erfolgt.

#### 5. Reinigungshinweise

Diese Lagerungshilfen sind für die Wischdesinfektion konzipiert, keine Nass- oder Maschinenwäsche. Sie sind nicht für Tumbler geeignet. Der jeweilige Bezug ist feuchtigkeitsabweisend aber nicht absolut flüssigkeitsdicht. Nach Reinigung und/oder Wischdesinfektion ist Stauflüssigkeit unbedingt zu vermeiden.

Die Produkte können mit einer warmen, milden Seifenlauge **nebelfeucht** gereinigt und mit handelsüblichen, alkoholfreien Flächen-Desinfektionsmitteln gemäß der DGHM-Liste laut Herstellervorgaben desinfiziert werden. Alkoholische Desinfektionsmittel greifen die Verhautung des Bezugsmaterials an, machen diese brüchig und verringern die Lebensdauer der Produkte. Keinerlei aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen (z.B. harte Bürsten) verwenden.

#### 6. Lagerung


Die Lagerungshilfen sind bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend, eben erfolgen, ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte.

## 7. Entsorgung

Das gebrauchte Produkt ist als Klinikabfall in der Einstufung gemäß LAGA18 zu entsorgen. Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten

Hersteller:  
Medstorm GmbH  
Comeniusstr. 6  
56073 Koblenz

Produkt hotline:  
+49 261 / 973 237 95  
buero@medstorm.de

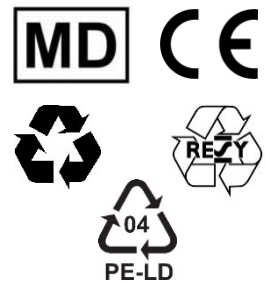

### Anhang

Detaillierte Aufstellung der Lagerungshilfen

lfd.	Artikel-Nr.	UDI-ID	Bezeichnung
1.	100117-1	04260502961612	Lagerungspolster ca. 40x15x3cm
2.	100120	04260502961261	Lagerungspolster ca. 40x25x5cm
3.	100125	04260502961629	Lagerungspolster ca. 35x20x8cm
4.	100130	04260502961643	Lagerungspolster ca. 40x25x10 cm
5.	100160	04260502961094	Lagerungspolster ca. 30x20x5cm
6.	905045-1	04260502961711	Lagerungsrolle ca. D=12, L=50cm
7.	905065	04260502961728	Lagerungsrolle ca. D=15, L=50cm
8.	905070	04260502961735	Lagerungsrolle ca. D=15, L=60cm
9.	905082	04260502961742	Lagerungsrolle ca. D=20, L=30cm
10.	910005	04260502961469	Halbrolle ca. H=7,5cm B=15cm L=50cm
11.	910035	04260502961759	Halbrolle ca. H=6cm D=12cm L=20cm
12.	910045	04260502961766	Halbrolle ca. H=7,5cm B=15cm L=20cm
13.	910080	04260502961858	Dreiviertelrolle ca.H=9cm B=10cm L=18cm
14.	910090-1	04260502961773	Dreiviertelrolle ca. H=20cm D=20cm L=30cm
15.	915020	04260502962282	Lagerungskeil ca. H=12/0 B=35 L=35
16.	930035-1	04260502961537	Lagerungspolster ca. 30x20x8cm
17.	930050	04260502962299	Lagerungsrolle ca. D=15, L=20cm
18.	950006	04260502961230	PU-Haube für ms-Kopfschalen
19.	950016	04260502961315	PU-Haube für Armausleger 45cm
20.	950018	04260502961780	PU-Haube für Armausleger 30cm
21.	950041	04260502960493	PU-Haube für Goepelhalterauflagen (Maquet)

Die Liste endet mit der laufenden Nummer 21.  
Stand: 16. 05. 2024