

Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

Produktgruppe: Kopfschale „multi“
Artikelnummer: 100005-09
UDI-ID: 04260502960387
Zolltarifnummer: 4014 9000



1. Technische Merkmale

Maße: ca. 25 x 22 x 11 cm (L/B/H)
Gewicht: ca. 0,6 kg
Material: Polyether/Polymer-Schaum mit PUR-Beschichtung

2. Verwendungszweck

Das Produkt ist eine Lagerungshilfe zur intraoperativen Lagerung des Kopfes in Seiten- oder Rückenlage. Unter bestimmten Voraussetzungen auch in Bauchlage einsetzbar, siehe Warnhinweise.

3. Anwendungshinweise

Die Anwendung der Kopfschale „multi“ in Rücken- oder Seitenlage ist für medizinisches Fachpersonal unkritisch und entspricht der allgemeinen Übung zur Patientenlagerung im medizinischen Bereich. Bei Seitenlage sollte darauf geachtet werden, dass das Ohr des Patienten mittig in der Kalotten-Höhlung der Kopfschale liegt, um den Druck des Kopfgewichtes auf das Ohr möglichst gering zu halten.

Eine flüssigkeitsdichte Auflage, z.B. Ein- oder Mehrweghaube ist im Gebrauch bei Rücken- und Seitenlagerung zu verwenden, **nicht jedoch** in Bauchlage

Für den Einsatz der Kopfschale „multi“ in Bauchlage sind zwingend die nachfolgenden Warnhinweise bei der Anwendung zu beachten.

4. Warnhinweise

Überprüfen Sie vor jeder Anwendung die Unversehrtheit der Beschichtung (PUR-Verhautung) der Kopfschale. Eine defekte Beschichtung verhindert das ausreichende Desinfizieren des Produktes und kann zu Schäden an der Haut führen. Ist die Unversehrtheit nicht gegeben ist das Produkt zu entsorgen.

Für den Einsatz in Bauchlage sind nachfolgende Lagerungsanforderungen zu erfüllen:

- Die Stirn des Patienten muss in der Vertiefung (Mulde) positioniert sein. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Nase die Lagerungsfläche/Polster des OP-Tisches nicht berührt. Der Nasenrücken und die Augen müssen freiliegen und dürfen keinen direkten Kontakt mit der Kopfschale haben.
- Eine nicht korrekte Positionierung des Kopfes kann zu folgensweren Druckstellen führen, daher immer die genaue Position des Kopfes, bzw. der tiefst liegenden Körperstellen (Wange, Ohren etc...) überprüfen. Die Überprüfung muss regelmäßig sowie grundsätzlich **nach jeder Lagerveränderung des Patienten** erfolgen.
- Bei ersten Anzeichen von Rötungen ist die Lagerung abubrechen und ein anderes geeigneteres Lagerungsmittel zu verwenden. Keinesfalls darf die Kopfschale Multi bei diesem Patienten dann weiterverwendet werden.
- Der Tubus ist gut zu fixieren und vorsichtig durch die vorgesehenen Durchführungen an der Unterseite der Kopfschale Multi zu führen. Achten Sie besonders darauf, dass die Schläuche nicht geknickt oder abgedrückt werden.
- Die Verwendung von Zwischenlagen (z.B. flüssigkeitsdichte Abdecktücher) ist in Bauchlagerung untersagt – **Erstickungsgefahr**

5. Reinigungshinweise

Das Produkt ist für die Wischdesinfektion konzipiert, keine Nass- oder Maschinenwäsche. Es ist nicht tumblergeeignet.

Die unbeschädigte Oberfläche mit handelsüblichen, alkoholfreien Flächendesinfektionsmitteln gemäß der DGHM-Liste reinigen. Keinerlei mechanisch aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen (z.B. Bürsten) verwenden. Sollte die Kopfschale „multi“ Flüssigkeiten aufnehmen, ist die Oberfläche beschädigt und die Kopfschale ist zu entsorgen.

6. Lagerung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend und eben erfolgen, ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte.

7. Entsorgung

Das gebrauchte Produkt ist als Klinikabfall in der Einstufung gemäß LAGA18 zu entsorgen. Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.



Hersteller:

Medstorm GmbH
Comeniusstr. 6
56073 Koblenz

Produkt hotline:

phone: +49 261 / 973 237 96
fax: +49 261 / 973 237 97
email: info@medstorm.de

Stand: 20. Februar 2024