


## Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

**Artikelbezeichnung:** Kopfschale Rückenlage Standard  
**Artikelnummer:** 100020-09  
**UDI-ID:** 04260502960417  
**Zolltarifnummer:** 4014 9000

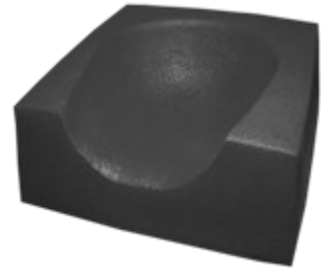

### 1. Technische Merkmale

**Maße:** ca. 24 x 24 x 10 cm (L/B/H)  
**Gewicht:** ca. 0,16 kg  
**Material:** Polyurethan-Schaum mit PUR-Beschichtung



### 2. Verwendungszweck

Das Produkt ist eine Lagerungshilfe zur intraoperativen Lagerung des Kopfes in Rückenlage. Die Kopfschale ist für Erwachsene konzipiert, bedingt auch für größere Kinder geeignet.

### 3. Anwendungshinweise

Die Anwendung der Kopfschale Standard in Rückenlage ist für medizinisches Fachpersonal unkritisch und entspricht der allgemeinen Übung zur Patientenlagerung im medizinischen Bereich. Position und Einsatz der Kopfschale wird durch das eingewiesene Fachpersonal vorgegeben und ausgewählt.

Ein direkter Hautkontakt des Patienten mit dem Produkt ist zu vermeiden. Es sollte eine flüssigkeitsdichte Auflage, z.B. Ein- oder Mehrweghaube verwendet werden.

### 4. Warnhinweise

- Beim Einsatz bei Kindern ist abhängig von deren Kopfgröße sicherzustellen, dass der Hinterkopf schlüssig in der Kalotte der Kopfschale aufliegt.
- Das Produkt nicht abspülen, nicht in Flüssigkeit tränken und nicht sterilisieren.
- Produkt nur bei Raumtemperatur anwenden.
- Sichtprüfung vor jeder Anwendung auf Unversehrtheit der Beschichtung (PUR-Verhautung). Bei sichtbaren Beschädigungen z.B. Risse, Dellen, Verformungen darf das Produkt nicht am Patienten eingesetzt werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Kontakt mit intakter Haut vorgesehen.
- Das Produkt ist nicht mit dem Patienten verbunden. Es dient ausschließlich der aufliegenden Lagerung des Kopfes ohne zusätzliche Befestigungen.
- Die Beschichtung des Produktes ist feuchtigkeitsabweisend aber nicht absolut flüssigkeitsdicht. Staunässe ist zu vermeiden.
- Der Einsatz dieser Kopflagerung ist nur mit einer flüssigkeitsdichten Zwischenlage (PU- oder Einweg-Hauben) zulässig.

### 5. Reinigungshinweise

Das Produkt ist für die Wischdesinfektion konzipiert, keine Nass- oder Maschinenwäsche. Es ist nicht Tumbler geeignet.

Die unbeschädigte Oberfläche mit handelsüblichen, alkoholfreien Flächendesinfektionsmitteln gemäß der DGHM-Liste reinigen. Keinerlei mechanisch aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen (z.B. Bürsten) verwenden. Sollte die Kopfschale Flüssigkeiten aufnehmen, ist die Oberfläche beschädigt und die Kopfschale ist zu entsorgen.

## 6. Lagerung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend und eben erfolgen, ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte.

## 7. Entsorgung

Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten  
Nicht kontaminiert kann das Produkt über den Restmüll entsorgt werden.  
Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.



### Hersteller:

Medstorm GmbH  
Comeniusstr. 6  
56073 Koblenz

### Produkt hotline:

phone: +49 261 / 973 237 96  
fax: +49 261 / 973 237 97  
email: [info@medstorm.de](mailto:info@medstorm.de)

Stand: 01. Juni 2023