

Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

Produkt: Armhalter „Seitz“- ArtNr. 200006-1

Artikelbezeichnung: Armhalter „Seitz“[®]
für Anästhesiebogen
Artikelnummer: 200006-1
Klassifikation MDR: Klasse I
UDI-DI: 04260502960141
Zolltarifnummer: 4014 9000



Armhalter „Seitz“[®]
Art.Nr. 200006-1

1. Technische Merkmale:

Maße Armhalter: ca. 27 x 25 x 4cm (L/B/H)
Gewicht: ca. 0,5 kg
Material: Polyurethan-Schnittschaum,
Kunstlederbezug, elektrisch ableitfähig,
Haken- und Flauschband, Nähgarn
Ersatz- u. Zubehörgurte: siehe Anhang

2. Verwendungszweck

Das Produkt ist eine Lagerungshilfe zur intraoperativen Positionierung eines Armes am Anästhesiebogen. Es wird als 3-teiliges Set geliefert. Die Set-Elemente können als Ersatzlieferung einzeln geordert werden.

3. Anwendungshinweise

Die Anwendung des Produktes ist für medizinisches Fachpersonal unkritisch und entspricht der allgemeinen Übung zur Patientenerhaltung im medizinischen Bereich. Position und Einsatz des Produktes wird durch das eingewiesene Fachpersonal vorgegeben und ausgewählt.

Bei Verwendung des Produktes ist eine textile Zwischenlage (z.B.: flüssigkeitsdichtes Saugvlies) in der Form einzulegen, dass ein direkter Hautkontakt des Patientenarmes mit dem Kunstleder weitestgehend vermieden wird.

Der schmale Fixiergurt ermöglicht die seitliche Fixierung am Anästhesie-Bogen. Der Gurt mit dem Ellenbogenpolster verhindert bei sachgemäßer Über-Kreuz-Befestigung (gemäß Abbildung) und ordnungsgemäßer Höheneinstellung des A-Bogens sicher das Herausrutschen des Armes.

4. Warnhinweise

- a) Sichtprüfung vor jeder Anwendung auf mechanische Beschädigungen und nur bei Raumtemperatur anwenden. Sind Beschädigungen sichtbar z.B. brüchiger oder eingerissener Bezug darf das Produkt nicht am Patienten eingesetzt werden.
- b) Das Produkt besteht aus elektrisch ableitfähigem Kunstleder und **darf nicht bei Laser-OP zum Einsatz kommen.**
- c) Das Produkt dient der Positionierung des Patientenarmes, stellt jedoch keine vollständige Fixierung dar.
- d) Bei Verwendung des Produktes ist eine ständige Überwachung erforderlich, insbesondere weil willkürliche oder absichtliche Bewegungen des Patienten zu Verletzungen im Bereich der Schulter führen können.
- e) Der Befestigungsgurt und der Armhalter müssen so am Anästhesiebogen angebracht sein, dass kein Druck oder Zug auf den Arm oder das Schultergelenk ausgeübt wird. Im Bedarfsfall ist ein längerer Gurt zu verwenden.
- f) Auch ist die Höhe des Anästhesiebogens so zu wählen, dass der Arm nicht verdreht oder abgewinkelt wird.
- g) Die Fixierung muss ein Herausrutschen des Armes aus der Armhülse sicher verhindern, darf aber zugleich die Blutzirkulation nicht beeinträchtigen. Zu locker angelegte Produkte können die Sicherheit des Patienten gefährden.
- h) Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Fixierung.
- i) Der Klettverschluss ist weitestgehend flächig überlappend anzubringen, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Klettverbindung zu verhindern, wie auch einen möglichst hohen Haftwiderstand zu erreichen.

5. Reinigungshinweise

Das Produkt ist für die Wischdesinfektion konzipiert, keine Nass- oder Maschinenwäsche. Es ist nicht Tumbler geeignet. Das Kunstleder ist feuchtigkeitsabweisend aber nicht absolut flüssigkeitsdicht. Staunässe ist deshalb unbedingt zu vermeiden. Das Produkt kann mit einer warmen, milden Seifenlauge **nebelnfeucht** gereinigt und mit handelsüblichen, alkoholfreien Flächendesinfektionsmitteln gemäß der DGHM-Liste laut Herstellervorgaben desinfiziert werden. Alkoholische Desinfektionsmittel greifen die Verhautung des Kunstleders an, machen dieses brüchig und verringern die Lebensdauer des Produktes. Keinerlei aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen (z.B. harte Bürsten) verwenden.

6. Lagerung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend, eben erfolgen, ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte.

7. Entsorgung

Das gebrauchte Produkt ist als Klinikabfall in der Einstufung gemäß LAGA18 zu entsorgen. Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.



Hersteller:

Medstorm GmbH
Comeniusstr. 6
56073 Koblenz

Produkt hotline:

+49 261 / 973 237 96
buero@medstorm.de



Anhang zum Datenblatt

Produkt: Armhalter "Seitz"- ArtNr. 200006-1

Lfd.	Artikel-Nr.	UDI-DI	Bezeichnung	ca. Maße
01	200002-1	04260502961292	Ersatzgurt-1 für Armhalter "Seitz" Standardlänge	70 x 5 cm
02	200004-1	04260502961384	Ersatzgurt-2 für Armhalter "Seitz" mit Ellenbogenschutz	70 x 15/5 cm
03	200007	04260502961377	Ersatzgurt-3 für Armhalter "Seitz" Sonderlänge, weitere möglich	100 x 5 cm

Liste endet mit der lfd. Nr. 03
Stand: 29. 10. 2023