

Datenblatt / Anwendungs- und Pflegehinweise

Produkt: Beinschalen-Softauflage – ArtNr. 200017 - Version 2.0/12.09.2023

Artikelbezeichnung: Beinschalen-Softauflage
Artikelnummer: 200017-09
UDI-ID: 04260502960165
Zolltarifnummer: 4014 9000



1. Technische Merkmale:

Produktmaße: ca. 45x30x3cm
Gewicht: ca. 300g
Material: Polyurethan-Schaum
PU-Bezug
Kantenschutz-Band
Klett-Flausch-Fixierung

2. Verwendungszweck

Abbildungen ähnlich

Dieses Produkt ist eine Lagerungshilfe zur intraoperativen Lagerung des Patientenbeines in Steinschnittlage.

Die Auflage dient der Druckreduzierung. Sie ist als Ersatz für das vorhandene Beinschalen-Polster konzipiert, kann aber auch als zusätzliche Weichauflage unter Beibehaltung des Originalpolsters genutzt werden.

3. Anwendungshinweise

Diese Lagerungshilfe darf nur von eingewiesenem Fachpersonal verwendet werden. Die Anwendung des Produktes ist für medizinisches Fachpersonal unkritisch und entspricht der allgemeinen Übung zur Patientenlagerung im medizinischen Bereich. Position und Einsatz des Produktes wird durch das eingewiesene Fachpersonal vorgegeben und ausgewählt.

Zum Schutz des Medizinproduktes ist der Kantenschutz über die Kanten des Originalgerätes zu ziehen, danach wird das mitgelieferte selbstklebende Klettband in Längsrichtung auf die gereinigte Innenseite des Originalgerätes (Beinschale) zu kleben. Das Produkt wird anschließend mit seinen beiden Laschen auf der Unterseite des Originalgerätes, ggf. unter Verwendung der beiliegenden Klettstücke befestigt.

Bei der Anwendung ist ein direkter Hautkontakt des Patienten zum Produkt durch Verwendung einer flüssigkeitsdichten Einweg- oder Mehrweghaube zu vermeiden.

Eine Überwachung des Patienten während der Behandlung ist erforderlich, insbesondere aber nicht abschließend ist das Fortbestehen der wunsch- und ordnungsgemäßen Lagerung nach Bewegung/Umlagerung des Patienten zu überprüfen.

4. Warnhinweise

- Sichtprüfung vor jeder Anwendung auf mechanische Beschädigungen und nur bei Raumtemperatur anwenden. Sind Beschädigungen sichtbar z.B. brüchiger oder eingerissener Bezug darf das Produkt nicht am Patienten eingesetzt werden.
- Bei Einsatz der Lagerungshilfe ist eine Fixierung des Beines mittels separatem Gurt gemäß den Herstellerangaben zum Originalgerät vorzunehmen.

5. Reinigungshinweise

Das Produkt ist für die Wischdesinfektion konzipiert. Der PU-Bezug ist bis 95° C für Maschinenwäsche, jedoch nicht für Tumbler geeignet.
Der PU-Bezug ist feuchtigkeitsabweisend aber nicht flüssigkeitsdicht. Staunässe ist deshalb unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt kann mit einer warmen, milden Seifenlauge **nebelfeucht** gereinigt und mit handelsüblichen, alkoholfreien Flächendesinfektionsmitteln gemäß der DGHM-Liste laut Herstellervorgaben desinfiziert werden. Alkoholische Desinfektionsmittel greifen die Verhautung des Bezuges an und verringern die Lebensdauer des Produktes. Keinerlei aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen (z.B. harte Bürsten) verwenden.

6. Lagerung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Die Lagerung sollte freiliegend, eben erfolgen, ohne mechanische Beeinträchtigung durch andere Geräte.

7. Entsorgung

Es sind die regionalen Entsorgungsvorschriften zu beachten.
Kartonagen und die Folien-Umverpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Hersteller:

Medstorm GmbH
Comeniusstr. 6
56073 Koblenz

Produkt hotline:

+49 261 / 973 237 96
info@medstorm.de

